



Napęd do wózka

SmartDrive MX2+



permobil

Płynne wspomaganie

Poruszanie się ręcznym wózkiem inwalidzkim może nadmiernie obciążać ramiona i prowadzić do problemów z nimi w przyszłości. Płynne wspomaganie SmartDrive redukuje nawet o 81%* liczbę pchnięć ciągów wózka i minimalizuje ryzyko przeciążenia ramion i barków, pozwalając zachować siłę i energię na inne aktywności.

* na podstawie danych zebranych z aplikacji SmartEvaluation



Różne rodzaje ergonomicznych uchwytów umożliwiają szybkie przymocowanie napędu do niemal każdego ręcznego wózka inwalidzkiego.

Napęd jest łatwy do zdemontowania, dzięki czemu świetnie sprawdza się w transporcie.

Opatentowana konstrukcja koła napędowego OmniWheel włącza się lub pozostaje zablokowana w dowolnej pozycji, utrzymuje optymalną przyczepność i pozwala na pokonywanie wzniesień o nachyleniu do 17%.

Waga 6 kg czyni SmartDrive najlżejszym dołączanym tylnym napędem do wózków na świecie.



Różne opcje sterowania pozwalają dopasować sposób wspomagania do Twoich potrzeb.

Sterowanie SpeedControl

Ruszaj, zatrzymuj się i zmieniaj swoją prędkość w trakcie jazdy.


Dioda LED informuje,
kiedy sterowanie
SpeedControl jest aktywne.

Ergonomiczny design
gwarantuje łatwość używania.

Urządzenie jest montowane
bezpośrednio do ramy wózka.

Kabel został wzmocniony
w celu zapewnienia
większej trwałości.

Mocowanie posiada opcję wydłużenia
w celu lepszego dopasowania.

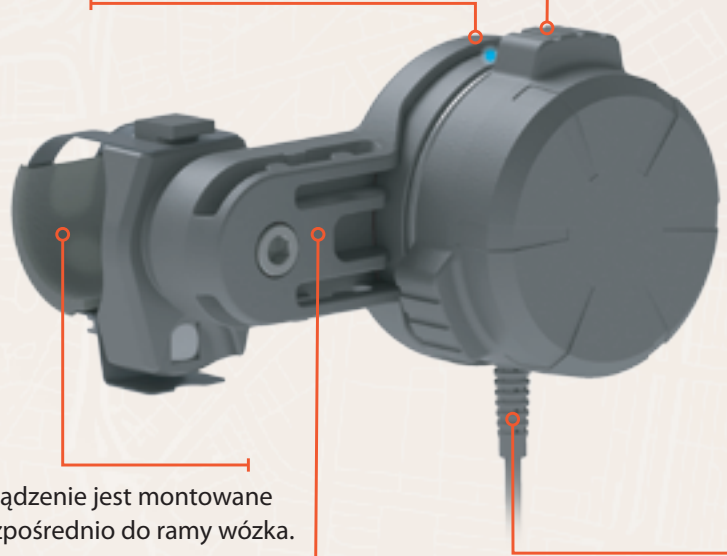

Rozpocznij korzystanie ze
sterowania SpeedControl
w ciągu kilku minut dzięki
prostej instalacji i wstępnej
konfiguracji ustawień.





Smartwatche premium

Teraz możesz sterować napędem SmartDrive MX2+ za pomocą Apple Watch (seria 5 lub nowsza) i Samsung Galaxy Watch (wersja 4 lub nowsza).

- Szybka i prosta konfiguracja.
- Zwiększona przejrzystość wyświetlania.
- Zmniejszone zużycie baterii.
- Bezpłatna aplikacja do pobrania ze sklepu App Store lub Google Play.



PushTracker E3

Opaska sterująca PushTracker w wersji E3 otrzymała lepszy procesor i wydajniejszą baterię.

- Fabrycznie zainstalowane aplikacje ułatwiające konfigurację w kilka minut.
- Mniejszy, lżejszy i wygodniejszy.
- Większa żywotność baterii.
- Bardziej responsywny i wydajny.



Zeskanuj kod, żeby pobrać aplikację SmartDrive MX2+

Sterowanie SwitchControl

SwitchControl to prosty sposób sterowania napędem za pomocą jednego przycisku. SwitchControl może działać w trzech trybach:

Tryb doraźny

Napęd będzie działał tak długo, jak długo będziesz przytrzymywał przycisk.

Tryb blokowany

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby ustawić prędkość. Jeśli zechcesz się zatrzymać, po prostu naciśnij przycisk ponownie.

Tryb z użyciem zewnętrznego przełącznika

Do obsługi sterowania SwitchControl możesz użyć dowolnego zewnętrznego przełącznika po podłączeniu go przez wejście typu mono jack.



Sterowanie SwitchControl
zamontowane na ramie wózka



Zewnętrzny, ergonomiczny
przycisk Buddy Button
podłączony do SwitchControl
przez wejście typu mono jack



Apple Watch

Sterowanie za pomocą smartwatcha premium.

PushTracker E3

Sterowanie i konfiguracja na czytelnym ekranie dotykowym.

SwitchControl

Przycisk z dodatkowymi opcjami sterowania napędem.

SmartDrive MX2+

Napęd umożliwiający pokonywanie wzniesień i ramp, grubych dywanów i długich dystansów.

SpeedControl

Łatwe ruszanie, zatrzymywanie się i zmienianie prędkości w trakcie jazdy.

Wspomagaj swoją aktywność, tak jak chcesz!

Nowy SmartDrive zapewnia użytkownikom wózków inwalidzkich większą kontrolę nad poruszaniem się niż kiedykolwiek wcześniej. Odkryj możliwości naszych urządzeń i oprogramowania we wspieraniu Twoich indywidualnych potrzeb w zakresie mobilności.

Nowe i ulepszone możliwości sterowania napędem SmartDrive sprawiają, że kontrolujesz poruszanie się za pomocą mniejszej ilości wygodniejszych kliknięć niż wcześniej.

	Sterowanie SpeedControl	Sterowanie SwitchControl	PushTracker E3	Aplikacja SmartDrive MX2+ dla smartwatchy premium
				
Darmowe przy zamówieniu napędu SmartDrive	✓	✓		
Produkowane przez Permobil	✓	✓	✓	
Urządzenie typu plug-and-play	✓	✓		
Konfiguracja w 5 minut	✓	✓	✓	✓
Programowalne ustawienia	✓	✓	✓	✓
Nie wymaga ładowania	✓	✓		
Posiada wejście typu mono jack		✓		
Współpracuje ze SwitchControl		✓	✓	✓
Współpracuje ze SpeedControl	✓		✓	✓
Możliwość sterowania przewodowego	✓	✓		
Nie wymaga WiFi	✓	✓	✓	✓
Zwiększenie lub zmniejszenie prędkości bez zatrzymywania się	✓			



Specyfikacja napędu SmartDrive MX2+

Wymiary	38,9 cm x 14,1 cm x 24,2 cm
Waga produktu	6 kg
Waga użytkownika	od 14 kg do 150 kg
Zasięg	do 19,8 km
Moc	250 W (silnik bezszczotkowy, prąd stały)
Maksymalna prędkość	8,8 km/h
Zakres temperatur	od -25°C do 50°C
Pasujące wózki	O ramie sztywnej lub składanej, jak również z odchylanym siedziskiem lub napędem jednoręcznym. Szerokość siedziska: od 8" (bez zabezpieczeń antywywrotnych) do 22"
Pasująca średnica kół	22", 24", 25", 26" (501 mm, 540 mm, 559 mm, 590 mm)
Gwarancja	2 lata
Bluetooth	FCC ID QOQBT113, IC ID 5123A-BGTBLE113
HCPCS	E0986

Pomiary wydajności mogą się różnić w zależności od charakterystyki użytkownika i wózka, sposobu jazdy i stanu akumulatora. SmartDrive został przetestowany i spełnia wszystkie obowiązujące wymagania norm ANSI/RESNA dla wózków inwalidzkich (tom 1 i 2) oraz EN 12184. UWAGA: Zainstalowanie napędu SmartDrive może nieznacznie wpłynąć na parametry wózka inwalidzkiego dostarczonego przez jego producenta. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące obsługi i utrzymania napędu znajdują się w instrukcji obsługi.